


Описание

Поручни опорные, откидные сантехнические для людей с ограниченными возможностями «Iste» помогают садиться, вставать и держать равновесие, служат поддержкой как для людей с ограниченными возможностями так и для людей пожилого возраста, людей с ослабленной спиной ногами, изготовлен из высоко прочных сплавов, крепление выполнено из нержавеющей металлов. Разработан и устанавливается на унитаз «Персона» пр. Старый Оскол Россия.





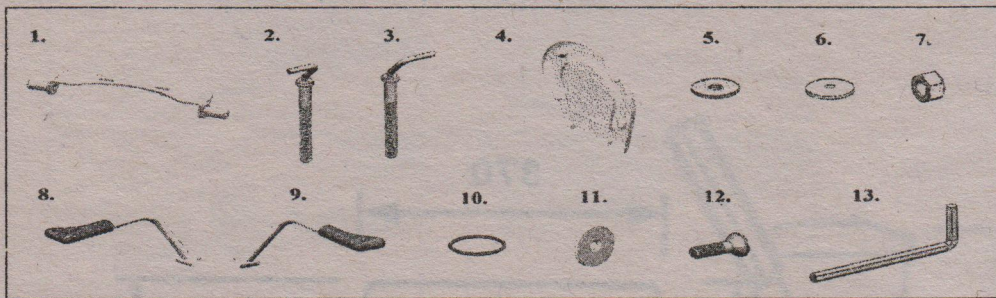


П/№	Наименование деталей	Кол-во, шт.
1	Полка опорная (кронштейн)	1
2	Крючок (фиксация полки, сидения) левый	1
3	Крючок (фиксация полки, сидения) правый	1
4	Сидение с крышкой	1
5	Шайба (металл 26-30)х8-9	4
6	Шайба (пластик 26-30)х8-9	2
7	Гайка М8	2
8	Подлокотник правый	1
9	Подлокотник левый	1
10	Кольцо уплотнительное (рез.) 30х2-3	1
11	Шайба широкая (фиксация подлокотников) 39х6	1
12	Винт потайной 6х16	2
13	Ключ шестигранный 4 мм.	1

Инструкция по сборке:

1. Наложите опорную полку 1 на унитаз (рис.1)
2. Вставьте левый и правый крючки 2,3 в отверстия сидения, разверните их наклонной частью по ходу движения крышки вниз, наденьте шайбы 5 на резьбу крючков (рис.2)
3. Установите сидение 4 с крючками на унитаз, используйте шайбы 6,5 и затените гайкой 7 (рис.3)
4. Установите правый и левый подлокотник 8,9 (рис.4)
5. Наденьте уплотнительное кольцо 10 на подлокотники (рис.5)
6. Зафиксируйте подлокотники, используйте широкую шайбу 11 с винтом 12 и затените ключом 13 (рис.6)
7. Сдвиньте уплотнительное кольцо к широкой шайбе (рис.7)
8. Изделие в сборе (рис.8)

Монтаж изделия

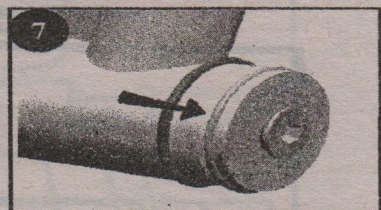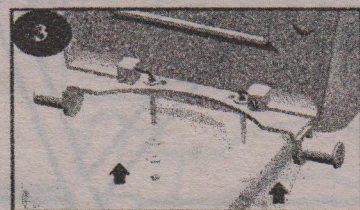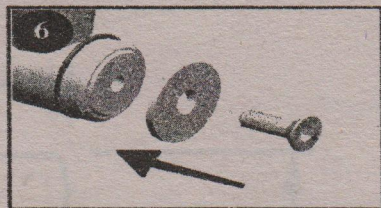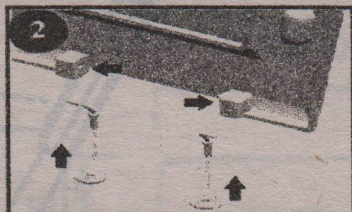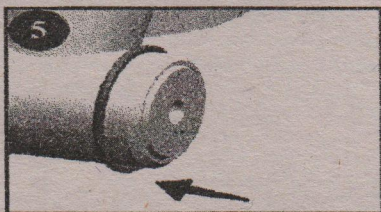

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

Уход за изделием

Изделие следует мыть теплой водой, тряпкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. Запрещается для мытья использовать моющие средства в состав которых входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием 2 года.

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на основании ТУ: 4951-001-31027056-2016.

Производитель: ООО «Сервис Групп» Россия, 192007 г. Санкт-Петербург ул. Воронежская дом 27

servis-grupp.com