



## Инструкция по монтажу и эксплуатации

### Опорные вспомогательные поручни для санузлов

Прежде чем устанавливать и эксплуатировать поручни из нержавеющей стали, приобретённые у нас, ознакомьтесь, пожалуйста, с данной инструкцией.

Опорные поручни предназначены для установки в санузлах и других помещениях, где необходимо оборудовать безопасное комфортное пространство для людей, которые испытывают затруднения при самостоятельном передвижении (люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, пожилые и ослабленные люди, инвалиды).

Опорные поручни в процессе эксплуатации испытывают большие динамические нагрузки, поэтому особое внимание необходимо уделить их надёжной фиксации.

В зависимости от способа установки все поручни делятся на три основные категории:

- а) настенные;
- б) напольные;
- в) комбинированные (стена-пол).



Настенный поручень



Напольный поручень



Комбинированный поручень

Если поверхность, к которой будет крепиться поручень, не имеет укреплённой структуры (пенобетон, гипсокартон и т.п.), необходимо предусмотреть закладные элементы или использовать специальную систему инсталляции.

### **Установка поручня**

1. На поверхности, к которой будет крепиться поручень, разметьте отверстия. Для этого приложите поручень к месту установки и отметьте центры монтажных отверстий.
2. Просверлите отверстия на требуемую глубину. Глубина отверстия определяется видом выбранного крепежа.
3. Используя крепёж, установите и закрепите поручень.

### **Уход за изделием**

При мытье поручней можно использовать мыльный раствор или специальные моющие средства, предназначенные для ухода за изделиями из нержавеющей стали. Наносить чистящее вещество на поверхность следует мягкой губкой. Не рекомендуется применять абразивные чистящие средства, а также вещества, содержащие хлор и йод.