

## ПАСПОРТ НА ВИДУАР «СБ-2»

Слив больничный (видуар) СБ-2 с двумя керамическими бачками и pedalным устройством подъема решётки.

Используется для опораживания, обмыва детских горшков, суден и больничного инвентаря, а также обработки их специальными дезинфицирующими растворами.

Видуар СБ-2 с керамическими бачками соответствует всем положениям СНиП 3.05.01-BS и САНПиН 2.1.3.1375-03 и может быть установлен в государственных учреждениях: в санитарных комнатах больниц, родильных домах, гинекологических, урологических, инфекционных отделениях, санитарных боксах, детских садах, яслях.

Код ОКПД2: 23.42.10.190 (ОКП: 49 6560)

Санитарно-технические изделия из керамики (сливы больничные (видуар)).

Код ОКПД2: 23.42.10.170 (ОКП: 49 6850)

Бачки смывные керамические (бачки к сливам больничным (видуарам)).

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Чаша (слив) из санитарного фарфора, выпуск косой	1 шт.
2	Решётка из нержавеющей стали (AISI 304)	1 шт.
3	Крепёж для установки решётки на чашу	1 компл.
4	Педаля ножная для подъёма видуарной решётки	1 шт.
5	Высокорасполагаемый смывной керамический бачок с крышкой	1 шт.
6	Сливная/наливная арматура для бачка	1 компл.
7	Пластиковая труба для соединения сливного бачка и чаши, Ø40 мм	1 компл.
8	Хомуты для фиксации соединительной трубы	2 шт.
9	Бачок керамический для дезинфицирующего раствора	1 шт.
10	Штуцер для подключения шланга к бачку	1 шт.
11	Лейка гигиенического душа с настенным держателем и шлангом 1,2 м	1 шт.
12	Переходная резиновая манжета Ø50/40 мм	1 шт.
13	Пластиковый отвод Ø40x90° мм	1 шт.
14	Локтевой настенный смеситель с поворотным изливом	1 шт.
15	Крепёж для установки унитаза и бачков	4 компл.

Изделие упаковано в картонную коробку и поставляется в разобранном виде.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Определитесь с местом установки видуара.
2. Подведите трубопроводы с холодной и горячей водой для смесителя (в комплект входит только смеситель настенный, без трубопровода). Установить смеситель.
3. Закрепите на стену смывной бачок верхний (для воды) через 2 отверстия, установите в нём водосливную арматуру со шнурком и водоналивную арматуру.
4. Закрепите на стену бачок нижний (для раствора) через 2 отверстия в задней стенке, установив предварительно штуцер в выпускное отверстие бачка. Подключите шланг гигиенического душа. Установите держатель лейки.
5. Установите временно видуар под смесителем. Предварительно в верхнее отверстие установите переходную резиновую манжету Ø50/40 мм и отвод. Выходящий конец отвода необходимо направить вверх.
6. Соедините верхний сливной бачок с видуаром при помощи пластиковой трубы Ø40 мм. Далее закрепите видуар и сливную пластиковую трубу на крепежные скобы или хомуты.
7. Установите решётку на видуар с помощью креплений (входят в комплект). При этом ушки крепления у решётки из нерж. стали необходимо выгнуть в нужную сторону.
8. Закрепите педальную систему для возможности поднятия решётки при нажатии ногой на педаль.  
При использовании педали для открывания решётки, можно использовать задний ножной фиксатор, для удержания решётки в открытом состоянии.  
После регулировки и пробного открывания решётки, необходимо закрепить педальную систему.
9. Подключите холодную воду к верхнему бачку через клапан с поплавком. Далее необходимо залить, для проверки системы, в нижний растворный бачок воду и проверить систему в целом на герметичность и работоспособность.

После проверки системы, в нижнем растворном бачке вода меняется на дезинфицирующий раствор и система готова к работе.